


Dual mode quick protocolo


Dual mode es el modo de tratamiento simultáneo de 3,0 mm y 4,5 mm de profundidad, la primera tecnología del mundo que inicia la síntesis del colágeno y la elastina, mejora las arrugas y la elasticidad de la piel y recupera la caída de la capa SMA de manera sencilla y efectiva.

1. Mejilla [Dirección vertical]

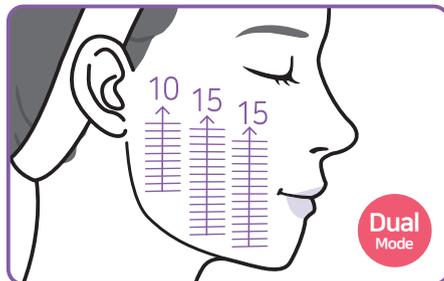


10-15 líneas desde la línea superior de la mandíbula al pómulo usando **Dual mode**

2. Mejilla [Dirección horizontal]

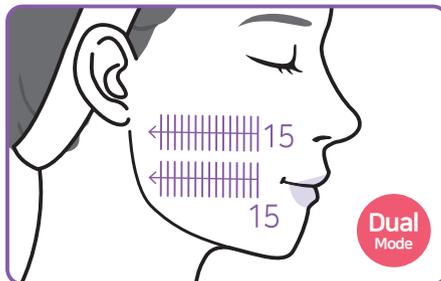


10-15 líneas desde el interior hacia el exterior bajo el pómulo usando **Dual mode**

3. Sienes

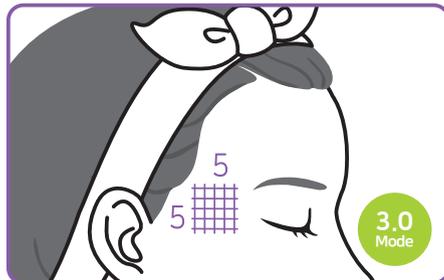

5 líneas horizontal y verticalmente usando únicamente el **3.0 mode**
(¡Precaución! No usar dentro de las cuencas oculares)

5. Cuidado bajo los ojos

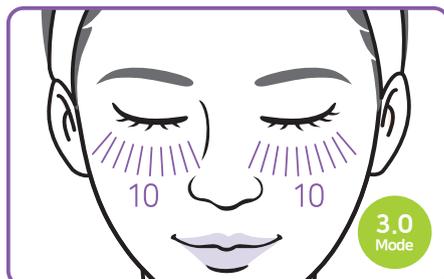


10 líneas bajo la línea del hueso para el lado derecho e izquierdo usando el **3.0 mode**
(¡Precaución! No usar dentro de las cuencas oculares)

4. Frente




10 líneas por encima de cada ceja usando el **3.0 mode**
(¡Precaución! Está prohibido el uso en el entrecejo)

6. Cara completa [cartucho contorno de ojos]

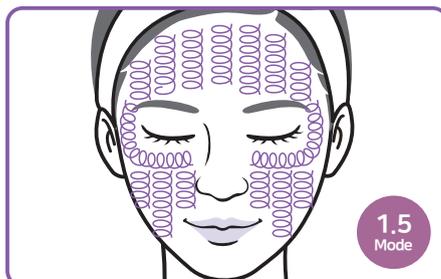

Usar el **1.5 mode** masajeando constantemente toda la cara (A 3Hz, para realizar 1000 disparos se tardará alrededor de 6 minutos)
(¡Precaución! No usar en áreas prohibidas)

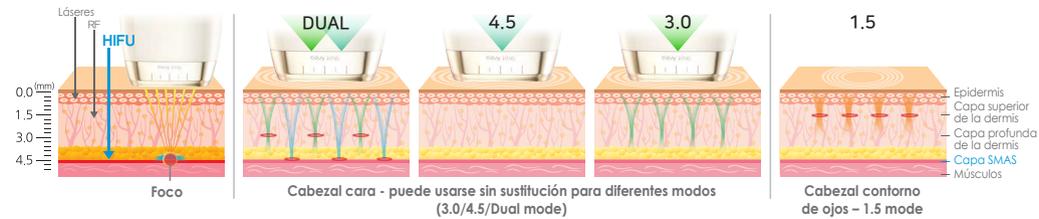

Eficacia en función del modo usado MODO

MODE	EFICIENCIA	CUIDADO REPETIDO
Dual mode	Tratamiento simultáneo de 3,0 mm y 4,5 mm para la mejora de arrugas, alta elasticidad y lifting facial que proporciona un efecto alto y de larga duración.	Una vez en intervalo de dos semanas (en función del estado de la piel)
4.5 mode	La energía térmica se transfiere a la capa SMAS, la cual es el motivo principal del descolgamiento de la piel, y proporciona un efecto lifting continuado.	
3.0 mode	La energía térmica se transfiere a la capa profunda de la dermis, lo que produce colágeno y elastina y ayuda a mejorar las arrugas y la elasticidad.	
1.5 mode	La energía térmica se transfiere a la capa superior de la dermis, lo que produce colágeno y elastina y ayuda a mejorar las arrugas finas.	

Nivel de energía y método de control del modo (profundidad/Hz)

1. Control del nivel de energía >(el mismo para el cabezal de cara y contorno de ojos)
Botón de modo de pulsación rápida / disparo para cambiar el nivel de energía.



2. Método de control del modo (profundidad) en cabezal de cara
Pulsar el botón de modo / disparo durante más de 2 segundos para cambiar de modo (profundidad).




3. Método para controlar la frecuencia de disparo (Hz) en cabezal contorno de ojos
Pulsar el botón modo / disparo durante más de 2 segundos para cambiar la frecuencia.



4. Método para usar el botón de modo cabezal contorno de ojos / disparo Durante el procedimiento, la pulsación continuada del botón de modo / disparo implica funcionamiento continuado del dispositivo con frecuencia de disparo de (1Hz/2Hz/3Hz) hasta que deje de pulsar el botón de disparo.

※ Hz significa número de disparos por segundo.
(Cuanto más alto sea el número de Hz, mayor es la velocidad de los disparos) [Ej. 3 Hz → 3 disparos / seg]

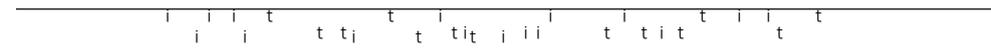

- Es esencial aplicar suficiente gel ultrasonido en la zona a tratar y colocar el Dualsonic Professional en contacto directo con la piel.
- Mover constantemente el cabezal contorno de ojos para evitar los disparos repetidos en el mismo punto.
- Controlar niveles de energía y modos adecuados a la sensibilidad del paciente.
- No usar el Dualsonic Professional en zonas húmedas; no es resistente al agua.
- No guardar Dualsonic Professional a temperaturas por debajo de 0°C ni por encima de 50°C. Esto puede dañar el dispositivo.
- Dualsonic no se debe utilizar en mujeres embarazadas o lactantes ni en zonas de piel con heridas abiertas.
- Dualsonic no se debe utilizar en personas con dispositivos de soporte cardíaco, implantes ó prótesis metálicas en la zona a tratar.
- Leer atentamente el manual de usuario antes de usar el Dualsonic Professional.



DUALSONIC PROFESSIONAL
Vídeo sobre (el modo de uso)

Make Better Beauty

DUALSONIC
Professional

PROTOCOLO DE TRABAJO

La tecnología HIFU de capa dual con la «primera patente mundial»

Dualsonic es una tecnología de capa dual patentada que trabaja directamente sobre la capa de la dermis y la capa SMAS sin incisión o daños en la piel, haciendo que esta sea más perfecta y resiliente.

Básico protocolo


Cuidado facial El modo dual es el modo de tratamiento simultáneo con una profundidad de 3,0 mm y 4,5 mm.

1. Mejilla [Dirección vertical]




10-15 líneas desde la línea superior de la mandíbula al pómulo usando **Dual mode** (puede sustituirse por el 4.5 o 3.0 mode)

2. Mejilla [Dirección horizontal]

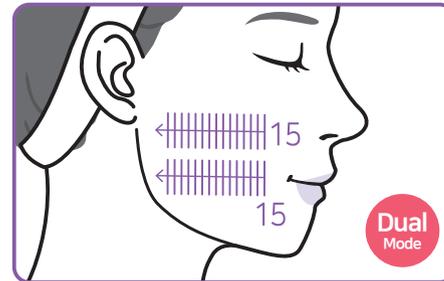


10-15 líneas desde el interior hacia el exterior bajo el pómulo usando **Dual mode** (puede sustituirse por el 4.5 o 3.0 mode)

3. Mejilla [dirección diagonal]

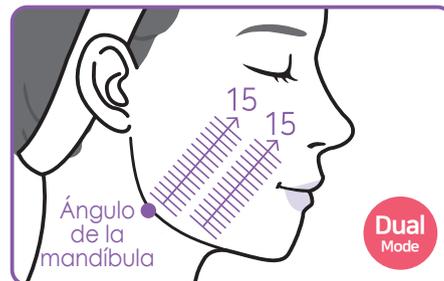


10-15 líneas empezando por el ángulo de la mandíbula hacia el hueso bajo los ojos usando **Dual mode** (puede sustituirse por el 4.5 o 3.0 mode)

5. Sienes

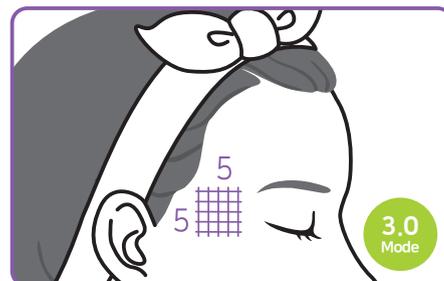

5 líneas horizontal y verticalmente usando únicamente el **3.0 mode** (¡Precaución! No usar dentro de las cuencas oculares)

4. Cuidado bajo los ojos

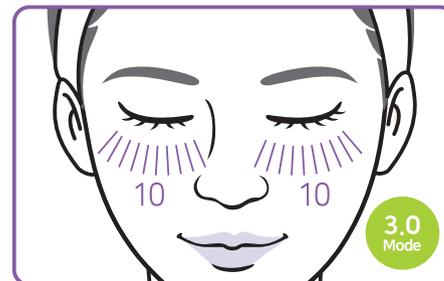


10 líneas bajo la línea del hueso para el lado derecho e izquierdo usando el **3.0 mode** (¡Precaución! No usar dentro de las cuencas oculares)

6. Frente




10 líneas por encima de cada ceja usando el **3.0 mode** (¡Precaución! Está prohibido el uso en el entrecejo)

7. Papada

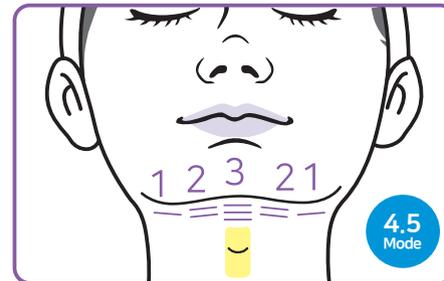

1-3 líneas usando **4.5 mode** en la zona de la papada (¡Precaución! Prohibido el uso en la línea del mentón)


8. Cara completa [cartucho contorno de ojos]

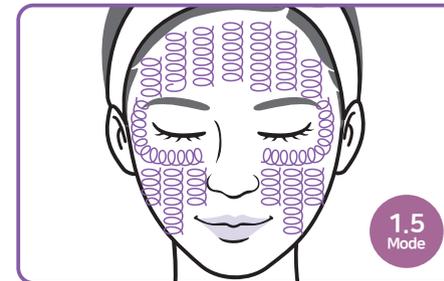

Usar el **1.5 mode** masajeando constantemente toda la cara (A 3Hz, para realizar 1000 disparos se tardará alrededor de 6 minutos) (¡Precaución! No usar en áreas prohibidas)


Cuidado del cuello Cuidado intensivo usando el 3.0 mode del cabezal de cara y el cabezal contorno de ojos (PRO: Nivel 5 / LUX: Nivel 3, 3 Hz)

1. Cuello [cabezal de cara]

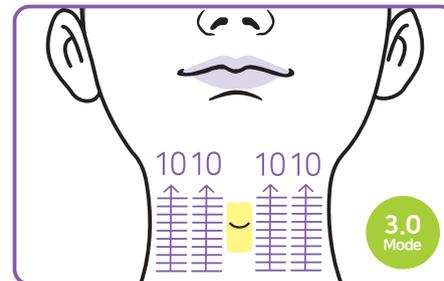

10 líneas usando **3.0 mode** (¡Precaución! Está prohibido el uso en la nuez. Controlar el nivel de potencia y la profundidad en función del grosor de la piel para evitar rojeces después del tratamiento)


2. Cuello [cabezal de contorno de ojos]

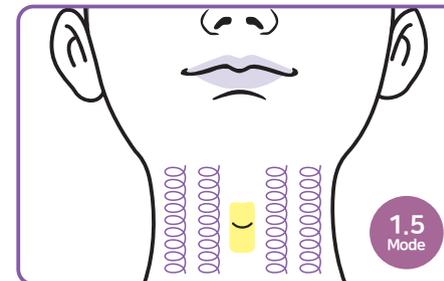

Usar el **1.5 mode** masajeando constantemente >(A 3 Hz, para realizar 500 disparos se tardará alrededor de 3 minutos) (¡Precaución! Está prohibido el uso en la nuez.) Controlar el nivel de potencia y la profundidad en función del grosor de la piel para evitar rojeces después del tratamiento)


Cuidado de las arrugas del contorno de ojos Cuidado intensivo usando el cabezal de cara 3.0 mode y el de contorno de ojos (Nivel 5 - 5 Hz)

1. Cuidado bajo los ojos [cabezal de cara]

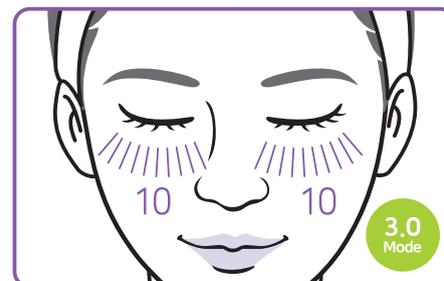

10 líneas bajo la línea del hueso para el lado derecho e izquierdo usando el **3.0 mode** (¡Precaución! No usar dentro de las cuencas oculares)


2. Zona alrededor de los ojos [cabezal contorno de ojos]

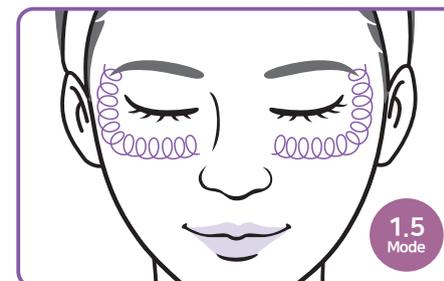

Usar el **1.5 mode** masajeando sobre el hueso alrededor de los ojos (A 3 Hz, para realizar 250 disparos se tardará alrededor de 1,5 minutos) (¡Precaución! No usar dentro de las cuencas oculares)


Lifting facial intensivo protocolo

1. Mejilla [Dirección vertical]

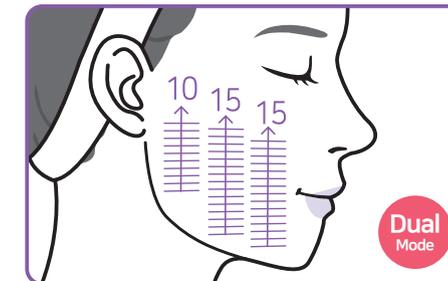

10-15 líneas desde la línea superior de la mandíbula al pómulo usando **Dual mode**

2. Mejilla [Dirección horizontal]

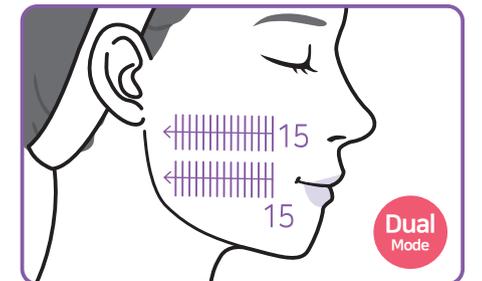


10-15 líneas desde el interior hacia el exterior bajo el pómulo usando **Dual mode**

3. Mejilla [dirección diagonal]




10-15 líneas empezando por el ángulo de la mandíbula hacia el hueso bajo los ojos usando **4.5 mode**

4. Papada

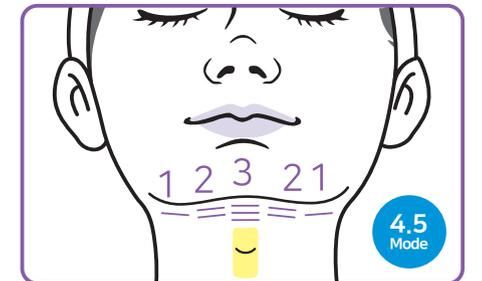


1-3 líneas usando **4.5 mode** en la zona de la papada (¡Precaución! Prohibido el uso en la línea del mentón)

5. Mejilla [dirección diagonal]

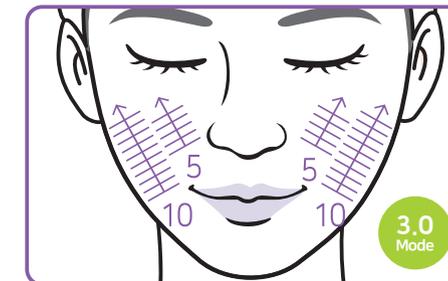

5-10 líneas empezando por la parte inferior hacia la superior usando **3.0 mode**

Zonas prohibidas

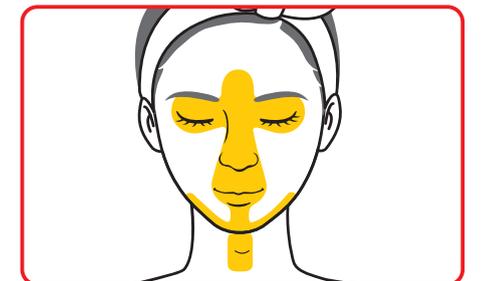

No usar en el entrecejo, dentro de las cuencas oculares, alrededor de los labios, en el pómulo y en la zona de la nuez.
 ✖ Evitar áreas con rellenos, injertos de grasa e implantes de hilos de lifting.
 ✖ El fabricante no se responsabiliza de ningún efecto secundario ocasionado por el uso del producto en áreas prohibidas.