



DUALSONIC

Professional

Lifting sin cirugía
Información sobre su aplicación



[tecnología HIFU]

INTRODUCCIÓN

DUALSONIC PROFESSIONAL es tecnología HIFU.

HIFU (Ultrasonido de Alta Intensidad Focalizado) es una tecnología moderna que está revolucionando la estética en el ámbito del rejuvenecimiento facial. Da los mejores resultados.

Este consiste en aplicar energía focalizada mediante un ultrasonido de alta intensidad produciendo calor localmente y provocando cambios positivos sobre el tejido de manera precisa, controlada y dirigida a un punto específico.

Dualsonic Professional es diferente a otras máquinas profesionales HIFU. Es más precisa, eficiente y efectiva en cara y cuello. No necesita cambio de cabezal para tratar distintas profundidades. Además esta patentada por ser la única del mercado en trabajar simultáneamente dos profundidades.

[Qué es y cómo funciona]

DUALSONIC PROFESSIONAL HIFU FACIAL

Qué es y cómo funciona?

El tratamiento con Dualsonic Professional detiene y transforma los efectos producidos por el envejecimiento de la piel. Consigue que las proteínas de la matriz extracelular se degraden, fundamentalmente el colágeno y la elastina, disminuyendo la síntesis del fibroblasto,

eliminando sequedad y flacidez cutánea, **devolviéndole a la piel la tensión perdida.** La energía necesaria para mover una molécula de un estado a otro se denomina energía de activación y el HIFU utiliza una emisión ultrasónica de alta intensidad, capaz de concentrar este tipo de energía. Las emisiones mencionadas pueden llegar a estructuras de profundidad determinadas, como la dermis superficial, la dermis profunda y el sistema

musculoaponeurótico superficial, generando un tensado inmediato de la piel, a través de la estimulación del colágeno, consiguiendo un efecto de lifting facial, que se mantiene durante un largo período de tiempo.

Este ultrasonido emite una vibración mecánica que, mediante choques moleculares, genera calor. Asimismo, tiene la capacidad de producir temperaturas intradérmicas, sin lesionar ningún tejido adyacente, generando así la energía de activación necesaria para producir la re-naturalización del tejido conectivo.

Estas proteínas de choque técnico se encuentran adheridas a las células y se hacen notar una vez que se produce cualquier tipo de estrés en la piel. Las

mismas son tratadas a través de emisiones de ultrasonidos focalizados lo suficientemente potentes para atravesar el tejido y depositar la energía necesaria, provocando la retracción inmediata y re-estructurando las moléculas de colágeno y elastina.



[Preguntas frecuentes]

Preguntas Frecuentes sobre el uso del **DUALSONIC PROFESSIONAL**

Como suele ocurrir con este tipo de aparatos, surgen numerosos interrogantes en torno a su uso. A continuación, te presentamos las preguntas más comunes acerca del HIFU.

Beneficios:

1. Cuáles son los beneficios?

El HIFU realiza principalmente un efecto lifting, tensado de la piel de la cara y antiarrugas, produciendo:

- Elevamiento de las cejas.
- Mejoras en la mandíbula, el cuello y el párpado superior.
- Exterminación de la laxitud de la piel.
- Disminución en las ojeras.

Mejora las arrugas de los ojos, los pliegues nasolabiales.
Mejora la hidratación, densidad y la elasticidad.

HIFU ayuda al paciente a **obtener una piel tersa, rejuvenecida y brillante** en el ámbito facial.

[Preguntas frecuentes]

2. Por qué Dualsonic es único?

El DUALSONIC PROFESSIONAL es una alternativa eficaz para evadir procedimientos quirúrgicos ya que realiza tratamientos no invasivos, sin incisiones en la piel y evitando el período de recuperación.

1. Lifting sin cirugía.
2. Baja inversión.
3. Sin dolor.
4. Fácil Uso.
5. Tiempo de sesión corto: 15-20 min.
6. Sin cables.
7. Exquisito diseño.
8. Cabezal contorno de ojos.
9. Ajuste de profundidad de impacto sin cambio de cabezal
10. Cada shot lleva más fuerza.
11. Trabaja simultáneamente dos profundidades.

Este tratamiento se puede aplicar en cualquier época del año, ya que se enfoca en perpetuar el estado del tejido, evitando que éste pierda elasticidad y firmeza, sin necesidad de incidir sobre otros factores.

Asimismo, el HIFU es el único método que deposita puntos de calor a distintas profundidades, lo que provoca cambios antiage muy notorios, lo que lo convierte en el tratamiento estrella del lifting.

3. Es seguro?

DUALSONIC PROFESSIONAL es un tratamieto extremadamente seguro y preciso, puesto que cuenta con un cabezal principal que emite energía en puntos concretos a distintas profundidades, los cuales calientan sin quemar los tejidos cercanos. Tiene también un cabezal de contorno de ojos. Dicho procedimiento puede ser programado según las necesidades de cada paciente.

[Preguntas frecuentes]

4. Tiene algún efecto secundario?

Al realizar el tratamiento puede producirse un ligero enrojecimiento hasta un máximo de una hora después del tratamiento. De igual forma, pueden experimentar cierta hinchazón leve y de naturaleza temporal.

5. Quién es un buen candidato para aplicarse este tratamiento?

Por lo general, el Dualsonic Professional se recomienda a hombres y mujeres de 30 años en adelante, que tengan laxitud leve a moderada de la piel, así como pacientes con cejas, párpados y contorno orbicular caído.

El enfoque de este aparato, el cual le hace ser una estrella en el mundo estético, permite tratar la flacidez del óvalo facial, de la región mandibular y del cuello.

Por otro lado, puede usarse en personas jóvenes que quieran mantener el tejido de la piel saludable, al igual que en pacientes que no quieran o no puedan someterse a intervención quirúrgica y buscan prolongar los efectos de la cirugía estética.

6. Cuánto dura el tratamiento?

La duración del tratamiento Dualsonic Professional dependerá de la zona elegida. De manera general, el tiempo estimado de casa sesión oscila entre 10 y 25 minutos. Una vez finalizada la sesión, el paciente puede realizar su actividad cotidiana.



7. Cuándo se obtienen los resultados?

El tensado inicial y la mejora de la densidad de tejidos son los primeros cambios que se obtienen post-tratamiento. Aproximadamente, el colágeno se reestructura en 21 días y, después de este tiempo, su calidad irá en aumento. El resultado completo se ve pasados uno o dos meses.

8. El Dualsonic Professional, es compatible con otros tratamientos médico-estéticos?

El HIFU puede ser mucho más efectivo si se combina con otros procedimientos, como el dermapen, el cual estimula las células madre; punta de diamante, para provocar la renovación celular y luz pulsada, para la eliminación de manchas faciales y rejuvenecer la piel.



[Tu centro]

INCLUIR EL DUALSONIC PROFESSIONAL EN TU CENTRO

El HIFU tiene como objetivo proteger las células y colaborar en la formación de la estructura terciaria de las proteínas, interviniendo en su ensamble, translocación y secreción, así como también en la degradación o reparación de proteínas anormales.

Este equipo se encarga de focalizar la energía térmica en un solo punto, descartando el resto de los tejidos. Su precisión y efectividad hace que sea más rápido que otras tecnologías.

Es muy utilizado en la actualidad, por el hecho de **ofrecer una alternativa no quirúrgica a los pacientes en el tratamiento de la flacidez y tensado cutáneo.**

Los resultados pueden ser visibles entre 15 y 30 días después de la primera sesión y el resultado final podrá apreciarse a partir del segundo mes.

Dependiendo de la zona a tratar, las sesiones de ultrasonido focalizado pueden durar desde 15 a 40 minutos.

Este equipo requiere inversión mucho menor que otros equipos Hifu y el retorno de la inversión es muy rápido. Si eliges re-

El Dualsonic Professional permite que la zona del tejido tratada vuelva a recuperar rápidamente su dimensión original, volviéndola más regular y, gracias a su efecto térmico, reestructurando sus proteínas y estimulando los fibroblastos, remodelando la zona tratada.

alizar la formación, tu centro puede tener el certificado de Profesional Dualsonic y estar incluido en listado de centros Dualsonic que ayuda a traer clientes a tu centro. Dualsonic Professional ofrece a tu empresa la posibilidad de tener este equipo sofisticado sin necesidad de invertir grandes cantidades de capital, y permite que tu centro de estética siga creciendo y que pueda competir con otros centros.

MANUAL DE USO DUALSONIC PROFESSIONAL

“PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO” [1]

DUALSONIC PROFESSIONAL es un aparato estético de tecnología focalizada de gran intensidad de ultrasonidos (HIFU) para mejorar las arrugas de los ojos, los pliegues naso labiales, la hidratación, elasticidad y densidad de la dermis y el lifting facial. El DUALSONIC PROFESSIONAL principio operativo es generar ondas ultrasónicas. Esta energía ultrasónica esta focalizada en una única zona, que genera la estimulación térmica que ayuda a mejorar la piel.

DUALSONIC PROFESSIONAL es un producto que ayuda a reducir las arrugas y aumenta la elasticidad de la piel. La energía ultrasónica actúa en la capa SMAS que esta en contacto con el musculo. Genera colágeno y elastina.

DUALSONIC PROFESSIONAL es diferente a otras maquinas profesionales HIFU. Es mas precisa, eficiente y efectiva en cara y cuello. No necesita cambio de cabezal para tratar distintas profundidades y además, es la única del mercado en trabajar simultáneamente dos profundidades.

** Asegúrese de leer y entender completamente las instrucciones antes de usar la máquina.*


“ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO”

Uso Objeto	Aparato cosmético para el cuidado de la piel
Batería	Litio (3,6 V 3350 mAh)
Cargador	5 V 2000 mA

Modo de capa	Intervalo de Proyección	Intensidad
<ul style="list-style-type: none"> • CARA • 3,0 • 4,5 • DUAL • CONTORNO DE OJOS • 1,5 	<ul style="list-style-type: none"> • CARA 1 Línea • CONTORNO DE OJOS 1 Hz 2 Hz 3 Hz 	<ul style="list-style-type: none"> • Dualsonic Professional • CARA: 5 niveles • CONTORNO DE OJOS: 5 niveles

[Manual de uso] [2]


“CONTENIDO DEL PRODUCTO”

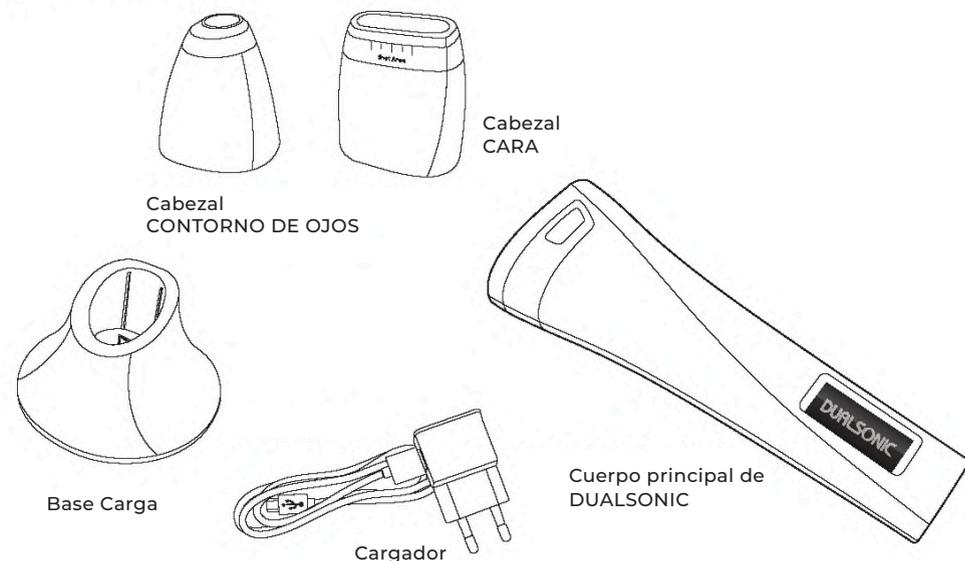

- Cuerpo principal x1,
- Cabezal CARA x1
- Cabezal
- CONTORNO DE OJOS x1
- Base carga x1
- Cable USB x1

[Manual de uso] [3]

“APARIENCIA DEL PRODUCTO Y NOMBRE”

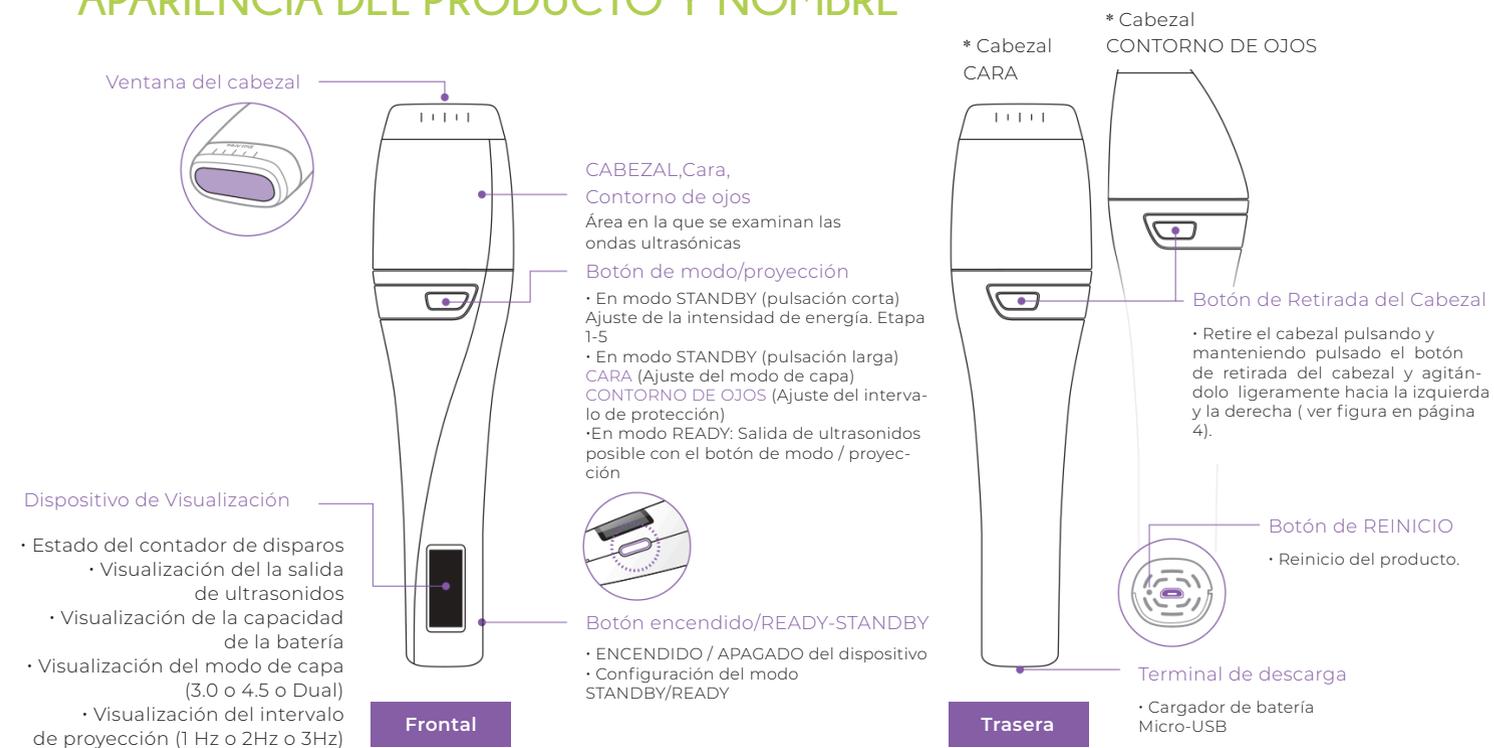

[Manual de uso] [4]

RETIRADA/MONTAJE DEL CABEZAL


• Precauciones durante la Retirada/Montaje del cabezal

- Puede sustituir el cabezal en función de la zona de tratamiento (Facial / Contorno de ojos)
- Resulta más eficiente usar el cabezal «CONTORNO DE OJOS» al realizar el tratamiento cerca de los ojos.
- Se mostrará el número de usos posibles en la «Visualización» de cada zona de tratamiento.



- Al montar o retirar el cabezal, es más sencillo retirar el cabezal agitándolo ligeramente a izquierda y derecha (ángulo de 45 grados), como se muestra en la figura, que pulsar y retirarlo en ángulo recto.
- Al realizar el montaje, alinee correctamente el cabezal y el cuerpo. El estado del montaje se muestra a través de la visualización.

Visualización del montaje de cabezal

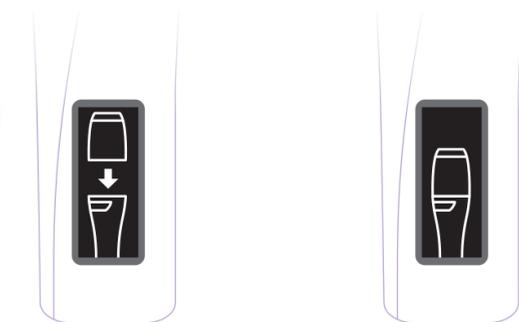

Si el cabezal no está montado, se muestra el icono correspondiente en la visualización



Cuando el cabezal está montado, el icono correspondiente se muestra y se pasa a la pantalla de configuración

** Se muestra la misma imagen en la visualización sin distinción de cabezal de CARA o CONTORNO DE OJOS.*

[Manual de uso] [5]

RECARGA DE PRODUCTO

- Durante la recarga, el icono de la visualización se enciende y apaga repetidamente y se muestra al 100%
- La carga se indica en la visualización durante unos segundos
- Cuando la visualización está apagada, al pulsar el botón de modo / proyección se volverá a encender la visualización.
- Si se mantiene pulsado el botón de modo / proyección, la visualización permanecerá encendida.

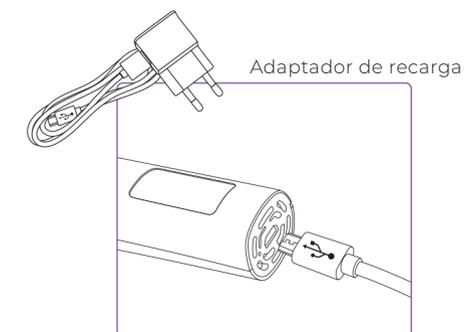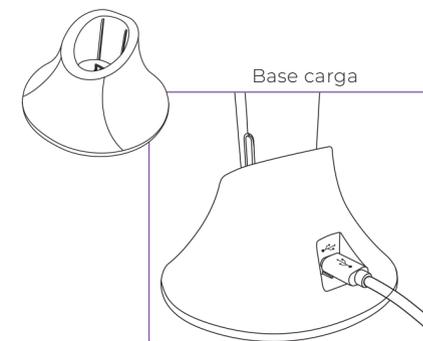

- El producto se puede recargar conectando el cargador a la estación de recarga.
- Se muestra la carga en la visualización.

- El producto se puede recargar conectando el cargador a la estación de recarga.
- Se muestra la carga en la visualización.

[Manual de uso]

INFORMACIÓN DE VISUALIZACIÓN



El de montaje del cabezal de cara



El de montaje del cabezal de CONTORNO DE OJOS



• Aquí encontrará la descripción de la «Visualización» en el cuerpo principal del dispositivo.

1. Visualización de la intensidad de energía

- Muestra la intensidad de energía (Etapa 1 -5)
- Ahorra intensidad de energía cuando el dispositivo está apagado

2. Visualización Bluetooth

Parpadea durante 60 segundos después de encender en Modo Standby de conexión

1. Mantiene el icono en conexión
2. Finaliza el Modo Standby si no hay conexión durante 60 segundos o si el botón de encendido se vuelve a pulsar

3. Visualización de Batería



4. Visualiza el modo de capa

- Visualiza el modo de capa (3.5 o 4.5 o Dual)

5. Visualización del intervalo de proyección (Montaje del cabezal de CONTORNO DE OJOS)

- Muestra el intervalo de proyección por segundo (1 Hz o 2Hz o 3Hz)

6. Visualización del número de disparos del cabezal restantes

- Muestra el número de disparos del cabezal restantes disponibles (Reduce en 1 al disparo)
- El número de la derecha indica el número de disparos en el momento de la compra de cabezal. (Fijo)

7. Visualización del número de disparos

- Muestra el número de disparos en la sesión
- Notifica con sonido a los 100 disparos de la sesión

[Manual de uso]

VISUALIZACIÓN DE LA ALARMA



Compruebe la notificación de la información del cabezal

- Ocurre cuando la información del cabezal es diferente
- Se desactiva cuando el cabezal es diferente




Compruebe la notificación del contador del cabezal

- Ocurre cuando el contador del cabezal está a «0»
- Se desactiva después de parpadear durante 3 segundos



Notificación de sobrecalentamiento del dispositivo

- Ocurre cuando el cuerpo y el cabezal alcanzan una temperatura determinada
- La alarma se desactiva después de un determinado periodo de tiempo

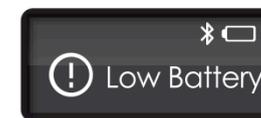

Notificación de descarga de batería

- El funcionamiento básico del equipo es posible, pero no está PREPARADO
- Se enciende durante 3 segundos / parpadea repetidamente




Compruebe el reinicio del cabezal

- Ocurre cuando el cabezal no se puede reiniciar en modo READY
- Se enciende durante 3 segundos / parpadea repetidamente y luego se suelta



Notificación de ejecución del dispositivo de seguridad de prevención de disparos de solapamiento

- Ocurre en caso de que se produzca un disparo de solapamiento
- Se enciende durante 3 segundos / parpadea repetidamente y luego se suelta

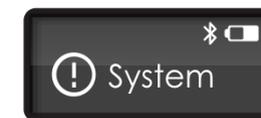

Compruebe la notificación del estado del sistema


- Ocurre cuando se produce una anomalía en el dispositivo
- Se desactiva cuando se enciende y apaga repetidamente

[Manual de uso] [4]

CABEZAL DE CONTORNO DE OJOS

• Cabecal de CONTORNO DE OJOS:

Resulta más eficiente usar el cabezal "CONTORNO DE OJOS" al realizar el tratamiento cerca de los ojos y zonas más meticulosas.

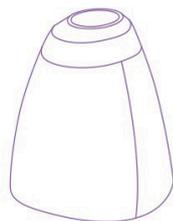

- Intensidad de energía: Etapa 1-5
- Intervalo de proyección: 1 Hz-3Hz (Proyecciones por segundo) (Ej. : 3Hz > 3 Proyecciones por segundo)



• Modo de almacenaje del producto

- Después del uso, limpie el gel del producto con un paño o un trapo suave.
- Tenga cuidado de que no se caiga el cuerpo o el cabezal de la máquina. (Vulnerable al impacto)
- Separe el cuerpo principal, el cabezal y el cargador cuando no vaya a usarse durante largos periodos.
- Después de largos periodos de inactividad, compruebe que se mantenga el normal funcionamiento y uso antes de volver a utilizarlo. Almacénelo en un lugar no expuesto a la luz solar directa.
- Evite almacenarlo en lugares peligrosos con materiales peligrosos, como productos químicos y gases.
- Almacénelo a temperatura ambiente para evitar que se congele el líquido en el interior del cabezal.

[Manual de uso]

PRECAUCIONES DE USO

1. Antes del procedimiento

- No use productos que puedan irritar la piel durante 3 días antes del tratamiento.
- Use un limpiador para lavar suavemente el rostro antes del tratamiento.
- Úselo completamente seco después del lavado.

2. Durante el procedimiento

- No use este producto alrededor de los ojos y los labios, pues esto puede ocasionar graves daños en los ojos e incluso ceguera
- No lo use en zonas en las que se hayan usado rellenos o trasplantes de grasa.
- Use siempre el gel agua de ultrasonidos durante el tratamiento. Después de aplicar el gel de ultrasonidos, el producto debe adherirse adecuadamente a la piel. En caso contrario, se podría dañar la piel. Si se produce un rasguño, inmediatamente detenga el uso y aplique hielo o pomada para quemaduras.
- Ajuste adecuadamente la fuerza a la piel y no pase dos veces por la misma línea. (El solapamiento puede ocasionar quemaduras.)
- Si el cabezal no entra en contacto con la piel adecuadamente y la energía de los ultrasonidos entra en contacto

con la superficie de la piel, se pueden producir quemaduras.

- Nunca retire el cabezal del cuerpo durante el funcionamiento, pues esto podría ser causa de mal funcionamiento del equipo.

3. Después del tratamiento (avisar al cliente)

- Después del procedimiento, la zona tratada puede presentar rojeces. (Estas normalmente desaparecen en unas horas)
- No usar sauna después del tratamiento.
- No rasgar ni tocar incluso si le pica la zona tratada DUALSONIC PROFESSIONAL
- Para evitar infecciones durante el uso del producto en distintas personas, esterilice la zona de contacto.
- No realizar una exfoliación durante al menos una semana después del tratamiento

4. No realice modificaciones en el instrumento arbitrariamente.

1. Almacene en un lugar libre de gases corrosivos o humedad. No toque el adaptador con las manos mojadas.
2. No sumerja el producto en agua u otros líquidos.
3. Déjelo de usar de inmediato si se producen problemas físicos. No obstante, compruebe la documentación o póngase en contacto con su representante en las oficinas centrales en caso de respuesta positiva y respuesta de mejora.

» Lea las «Precauciones de seguridad» atentamente antes de usar el producto y hágalo adecuadamente. Asegúrese de respetar las precauciones que se muestran aquí, pues contienen información de seguridad importante. En este manual, el grado de riesgo de manipulación y uso inadecuados se clasifica en las siguientes tres categorías.

[Manual de uso]

PRECAUCIONES DE USO

PRECAUCIÓN

1. No lo use para propósitos distintos del propósito original. Puede ser la causa de un accidente.
2. No lo use ni almacene en zonas calientes o con polvo tales como baños, cocinas, o vehículos. Esto reduce el tiempo de vida del dispositivo y ocasiona fallos.
3. Compruebe la seguridad antes de volver a utilizarlo después de largos periodos de inactividad.
4. Cuando esté en uso, asegúrese de que se encuentre alejado de aparatos eléctricos tales como dispositivos electrónicos, televisores y equipos de audio y no conecte varios dispositivos en una misma toma.
5. No coloque artículos pesados, agua o bebidas sobre el producto.
6. Extraiga o introduzca en la toma el cable de conexión y conéctelo y desconéctelo con las manos secas. No lo desconecte mientras haya corriente.
7. No mezcle accesorios de otros dispositivos. Use únicamente las piezas diseñadas para este dispositivo.
8. No lo exponga a impactos. Esto puede ser la causa de una avería, desgarrarse y ocasionar fallos.
10. No lo use si el estado de su piel tiene lesión o esta en proceso de curación.
11. No lo use si hay sustancias metálicas en la zona de tratamiento.

» La empresa no podrá considerarse responsable en caso de pérdidas de propiedad, problemas físicos o daños económicos en caso de que el cliente no siga correctamente las siguientes precauciones de seguridad.

ADVERTENCIA

1. Niños / Mujeres embarazadas
2. Herida abierta / Cicatriz hipertrófica
3. Acné folicular capilar severo / piel sensible
4. Si hay un stent metálico en la zona de uso
5. Si hay un implante absorbente
6. Dispositivo médico implantable colocado (marcapasos, etc.)
7. Estado de la piel que puede afectar al proceso de curación

PELIGRO

1. Usuarios de dispositivos médicos implantables tales como marcapasos, etc.
 2. Usuarios de dispositivos médicos electrónicos de soporte vital, tales como un oxigenador de membrana extracorpóreo
 3. Usuarios de dispositivos médicos electrónicos montados tales como monitores EKG
 4. Partes del cuerpo con metal, plástico, silicona, etc.
- » Los contenidos anteriores son obligatorios en el manual de acuerdo con la Ley PL

 **Peligro** El hecho de ignorar esta indicación y gestionarla incorrectamente puede entrañar un riesgo grave de muerte de personas o lesiones graves.

 **Advertencia** El hecho de ignorar esta indicación y gestionarla incorrectamente puede entrañar un riesgo de muerte de personas o lesiones graves.

 **Precaución** El hecho de ignorar esta indicación puede causar daños personales o a la máquina

[Manual de uso]

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

1 P. No se enciende

R. Asegúrese de que haya suficiente batería y pulse el botón de encendido durante al menos 3 segundos. Si el dispositivo sigue sin funcionar, póngase en contacto con nuestra empresa por teléfono o a través de nuestro sitio web.

2 P. No se apaga

R. Si no se apaga incluso después de mantener pulsado el botón de alimentación durante al menos 3 segundos, pulse el botón de REINICIO en la parte inferior del dispositivo con un objeto punzante para poder reiniciar el dispositivo.

3 P. No se carga

R. Intente cargar el dispositivo con un cargador diferente y, si el problema persiste, póngase en contacto con nosotros.

4 P. ¿Tengo que usar un cargador en concreto?

A. Puede usar un Cargador Micro de 5 pines.

5 Q. ¿Se puede usar durante la carga?

R. Una vez que el cargador está conectado, se apagará y pasará al modo de carga, lo que impedirá el uso durante la carga.

6 P. ¿Cuánto tarda una recarga completa?

R. Una recarga completa tarda aproximadamente 2 horas y

30 minutos y permite el uso durante 1 hora y 30 minutos. (El tiempo puede variar en función del dispositivo.)

7 P. ¿Cuántos minutos debería durar 1 uso?

R. Alrededor de 10-20 minutos, en función del modo de uso.

8 P. ¿Cómo lo uso?

R. Aplique suficiente cantidad de gel hidratante sobre el rostro seco después de lavarlo y a continuación póngalo en contacto con la piel para el uso.

9 P. La alimentación no funciona cuando se enciende?

R. Si ha dejado de funcionar, reinicielo y póngase en contacto con nosotros para más información.

10 P. ¿Como saber el número de disparos que quedan?

R. El número de disparos usados y el número de los restantes se muestran en el modo standby.

11 P. ¿Cuánto dura el periodo de garantía y cómo me registro?

R. La garantía es gratuita durante 1 año tras la adquisición y el registro puede realizarse por telefono o por correo electrónico.

[Manual de uso]

PREGUNTAS FRECUENTES

12 P. ¿Cómo puedo realizar un cambio o una devolución?

R. Si el motivo es atribuible a nuestra empresa, por un fallo del dispositivo, puede devolverlo de forma gratuita y sustituirlo.

13 P. El dispositivo se calienta

R. Algunas acciones pueden generar calor. Cuando se recaliente, apague la máquina, deje que se enfríe y vuelva a usarla. Póngase en contacto con nosotros si se producen los mismos síntomas. (Los criterios del recalentamiento pueden variar de una persona a otra.)

14 P. Escucho un ruido fuerte cuando el dispositivo está en funcionamiento

R. Algunas operaciones pueden generar ruido. Si se produce un ruido excesivo después del primer uso, deje de usarlo y póngase en contacto con nosotros. (El nivel de ruido percibido puede variar de una persona a otra.)

15 P. ¿Cual son los modos de capa?

R. 3.0 O 4.5 O DUAL

16 P. ¿Cual es la intensidad de salida?

R. Dualsonic Professional Etapa 1 -5

17. P. ¿Duele?

R. Dado que el nivel de dolor varía de una persona a otra, ajuste intensidad.

18 P. ¿Cómo limpiar el dispositivo después del uso?

R. Limpiarlo con un paño o un trapo suave.

19 P. ¿Cómo poder saber cuánta batería le queda?

R. Comprobar la visualización en la parte superior derecha después de encender el dispositivo.

20 P. ¿Cómo almacenar el dispositivo?

R. Mantenerlo alejado de la luz solar directa.

21 P. ¿Puede usarse en zonas distintas al rostro?

R. No se recomienda usar el dispositivo en zonas fuera de las que indicamos.

22 P. ¿Puede usar el dispositivo en cliente embarazada?

R. Revisar y usar el manual para conocer las restricciones y precauciones.

23. P. ¿Cómo reiniciar el dispositivo?

R. Pulsar el botón pequeño en la parte inferior junto al puerto de recarga.

24. P. No ocurre nada al encender despues de reiniciar la maquina.

R. Separar el cabezal del cuerpo y apretar la cara del engranaje con el dedo según se muestran en la ilustración más adelante y girarlo en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.





DUALSONIC

Professional

Lifting sin cirugía
Información sobre su aplicación

www.dualsonicprofessional.com

info@dualsonicprofessional.com

tel: +34 965 165 238

